

# Lingettes nettoyantes désinfectantes

## Pour mains, surfaces et objets

### ASEPTONET

---



#### **Conditionnement**

Format de lingette : 130 x 200mm

Boîte de 100 lingettes

Carton de 12 boîtes

#### **Composition**

Contient notamment :

Chlorure de benzalkonium, Trideceth -7, Ethanol, Isopropanol.

Moins de 5% d'agents de surface non ionique.

Parfum dont limonène

#### **Propriétés microbiologiques**

En conditions de saleté (sauf \*)

- Bactéricide EN1040, EN1276, EN13697, EN14561 (dont SARM) en 5 min.
- Bactéricide EN1500 en 1 mn.
- Tuberculocide sur Mycobacterium Terrae EN14348 et EN14563 en 15mn.
- Fongicide sur Aspergillus Niger EN1275, EN13697, EN14562\* en 5 min.
- Levuricide sur Candida albicans : EN1275, EN1650, EN13697, EN13624\*, EN14562\* en 5 min.
- Virucide\* EN14476 sur l'Herpès Simplex Virus (HSV) en 5 min, Coronavirus, Influenza A (H1N1), HBC, HCV, Adenovirus, VRS, Polyomavirus, Norovirus en 1 min, Rotavirus en 15mn.

Tolérance cutanée testée sous contrôle dermatologique.

#### **Mode d'emploi**

Lingettes prêtes à l'emploi à usage unique.

Soulever le couvercle et retirer l'opercule d'étanchéité. Insérer ensuite la lingette centrale à l'intérieur du capot. Passer la lingette sur le matériel à nettoyer et désinfecter.

Bien refermer le couvercle après utilisation. Sèche rapidement et ne laisse aucun résidu.

Action dans les 5 minutes après le passage de la lingette.

#### **Précautions d'emploi**

Eviter le contact avec une peau irritée, une plaie ou les muqueuses.

Consulter la fiche de données de sécurité au préalable.

---

Réf : ASEPMAINS - Code formule 998 077

Fiche Technique. Version 3- 02/2014

STERIDIS - ZAC de la Blanche Tâche - 80450 CAMON

Tél : 03 22 09 41 39 - Fax : 03 22 50 01 34 - mail : [contact@steridis.com](mailto:contact@steridis.com)